

COMO UTILIZAR CORRETAMENTE O SEU



Apresentações:

Embalagem com uma bisnaga de 40g.

Embalagem com uma bisnaga de 50g.

Embalagem com uma bisnaga de 100g.

Embalagem com 5 bisnagas de 5g cada, para uso único.

Embalagem com 5 aplicadores preenchidos com 5g cada, para uso único.

Embalagem com 5 sachês de 5g cada.

Embalagem com 5 sachês com 10g cada.

Composição:

hidroxiethylcelulose, glicerina, clarato de glicerila, propilenoglicol, metilparabeno e água purificada.

PRESERV GEL® LUBRIFICANTE ÍNTIMO é um gel incolor e transparente, não gorduroso, semelhante à lubrificação natural, que proporciona uma lubrificação segura, confortável e discreta.

O gel não é notado, não interfere na relação sexual e não há perda de sensibilidade. É inodoro e solúvel em água. Espalha-se e é removido com facilidade. Não mancha e não é irritante. Sem contra-indicações, é seguro para tecidos delicados, sendo assimilável pela mucosa vaginal.

PRESERV GEL® LUBRIFICANTE ÍNTIMO foi dermatologicamente testado em humanos e demonstrou não provocar reações alérgicas.

Indicações:

PRESERV GEL® LUBRIFICANTE ÍNTIMO é especialmente formulado para lubrificação sexual; é indicado para os casos onde há falta de lubrificação íntima (secura vaginal) ou quando se deseja uma lubrificação adicional. Sua finalidade é aliviar o desconforto e a irritação local causados pela falta de lubrificação vaginal, durante o ato sexual.

A lubrificação natural da vagina, também conhecida como lubrificação íntima, é um processo natural que ocorre no corpo da mulher, preparando-a para o ato sexual.

A falta de lubrificação íntima (secura vaginal) é uma ocorrência comum, causada por mudanças hormonais pré e pós-parto, cirurgias diversas, problemas emocionais, psicológicos ou sexuais com o parceiro, pela menopausa, pelo uso excessivo de duchas vaginais e inflamações (como a vaginite), por reações a alguns medicamentos.

OBS.: O produto não soluciona as causas de secura vaginal. Para orientação sobre o tratamento dessas ocorrências, procure seu médico.

PRESERV GEL® LUBRIFICANTE ÍNTIMO também pode ser usado para facilitar a inserção de termômetros na via retal, tampões, clisteres, enemas e para aumentar a lubrificação quando do uso com preservativo.

Modo de usar:

Aplicar PRESERV GEL® LUBRIFICANTE ÍNTIMO, na quantidade desejada, na área externa da vagina e do pênis. As aplicações podem ser repetidas por um ou ambos os parceiros. Deve ser aplicado antes do ato sexual para proporcionar uma lubrificação adequada.

Uso com preservativo:

Aplique PRESERV GEL® LUBRIFICANTE ÍNTIMO diretamente no preservativo ou externamente, na área genital. O gel não estraga o preservativo além de proporcionar maior conforto.

PRESERV GEL® LUBRIFICANTE ÍNTIMO reduz o risco de ruptura de preservativos, aliviando o desconforto no ato sexual. É indicado para o uso com preservativos, pois não danifica materiais de látex.

ATENÇÃO:

O uso de produtos, como: pomadas medicinais, cremes hidratantes, loções para bebês, vaselina e outros lubrificantes à base de óleo mineral (petróleo) ou vegetal, podem causar o rompimento de preservativos.

Este produto não se destina ao uso para fins contraceptivos, por não conter espermicida. Se ocasionalmente ocorrer irritação da vagina e/ou pênis, interrompa imediatamente o uso do produto e consulte o médico.

PODE SER USADO COM PRESERVATIVO DE LATÉX.

SOLÚVEL EM ÁGUA.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Mantenha o produto à temperatura ambiente. Não congele.

Manter em local fresco e protegido da luz e umidade.

Nº do Lote, Data de Fabricação e Validade: Vide Cartucho.

Conheça toda nossa linha,
entre no site:
www.preserv.com.br



Blausiegel Ind. e Com. Ltda.
CNPJ 58.430.828/0001-60
Rod. Raposo Tavares, 2833 - km 30,5
CEP 06705-030 - Cotia - SP
Indústria Brasileira
www.preserv.com.br

Reg. ANVISA nº 10163770016
Farm. Resp.: Satoro Tabuchi
CRF - SP nº 4.931



EMBUL-2701-R15